


Tillbehör



Hållare
Korg

Art. nr. 300715730
Art. nr. 300014110

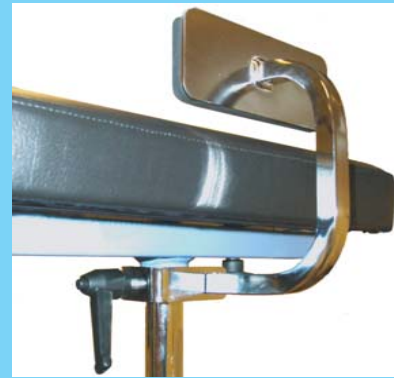

Sidostöd kpl par Art. nr. 300015710



Droppställning

Art. nr. 300015720

SMK AB

Öm Västra Backgården
541 36 Skövde

Tfn: +46 500 - 49 50 60
Fax: +46 500 - 41 14 37

Hemsida: www.smkab.se
Epost: post@smkab.se


Bruksanvisning

Gåbord ADAM Bred gasfjäder 25kg



Art. nr. 300015251



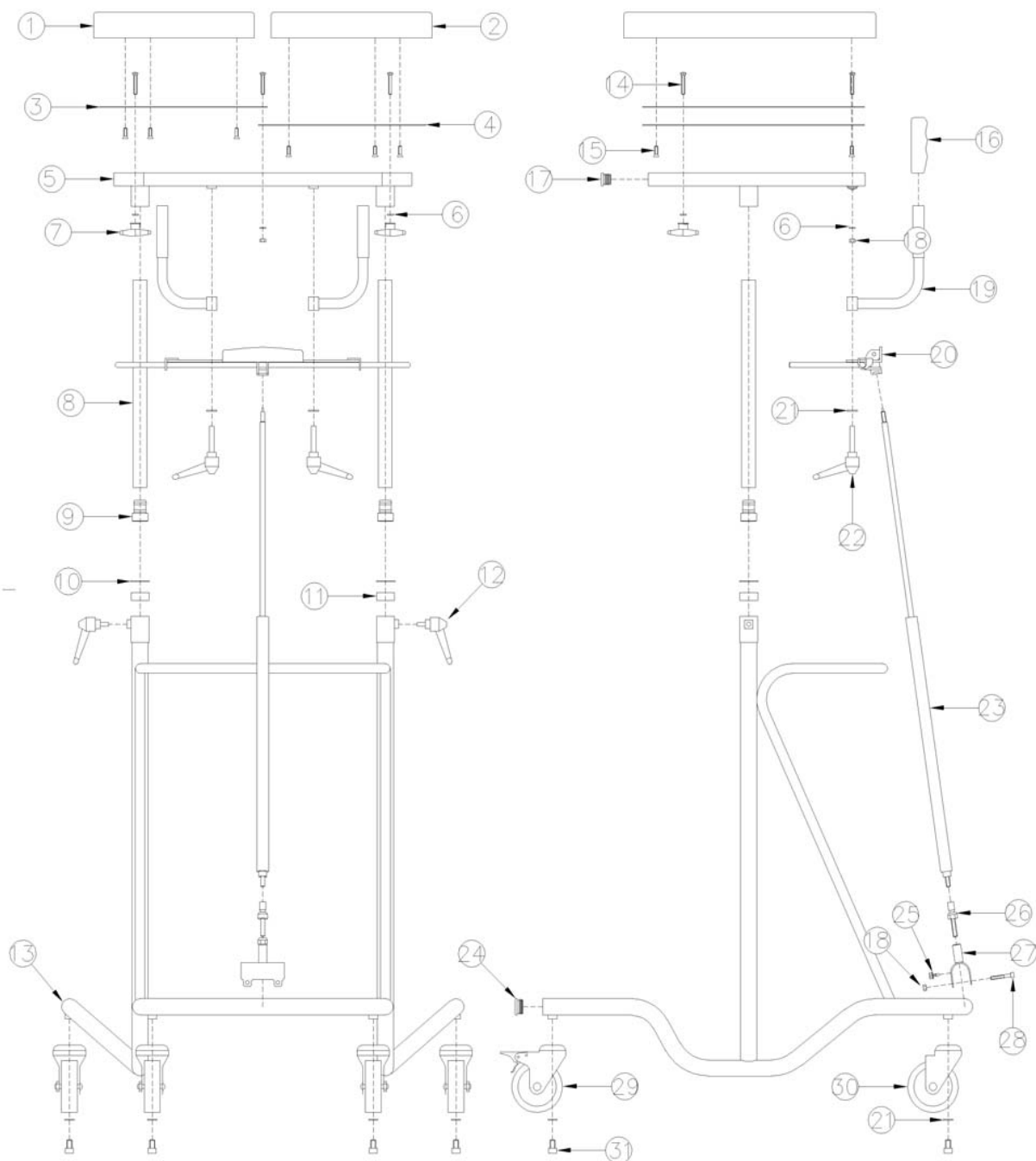

Nr	Antal	Benämning	Art. nr	Nr	Antal	Benämning	Art. nr
1	1	Dyna höger	1558-1	21	6	Bricka, BRB 10,5x18x1,6	4331051
2	1	Dyna vänster	1558-2	22	2	Låsspak WN511 83-M10x50	090222
3	1	Underdel till dyna 1550 höger	1563-2	23	1	Gasfjäder med ventil 250N	905100-10
4	1	Underdel till dyna 1550 vänster	1563-1	24	2	Plastfot 32mm svart	GL32 SV
5	1	Överdel till 1550	1552	25	1	Skruv, 4,3x13 R6B B8x13 FZB	R6B080131
6	3	Bricka, BRB 6,4x12x1,5	1250641	26	1	Fäste rak kullänk M8	900867
7	2	Korsvred	090227	27	1	Undre gasdämparfäste 1550	13-94111801
8	2	Kromben till 1550 Ø27x2	9338100451	28	2	Skruv, M6x40 MC6S Insex	9128060401
9	2	Kuts till gåbord	1560-N2	29	2	100x30C10 Länkhjul BR	14490
10	2	Flänsring, SW stål 35 FZB	SW0351			alt. 125x30 Länkhjul BR	14500
11	2	Nylonhylsa	1590-N1	30	2	100x30C10 Länkhjul	14150
12	2	Låsspak WN511 83-M10x20	090221			alt. 125x30 Länkhjul	14160
13	1	Underdel 1550 bred	1557-100	31	4	Skruv, M10x16 MC6S Insex	9128100161
14	3	Skruv, M6x40 MVBF Stål FZB	603060401				
15	6	Skruv, M6x16 MFX	96506011				
16	2	Handtag 22mm svart	33013219				
17	2	Plastfot 50x25 svart	VL50X25 SV				
18	3	M6 Låsmutter	9850601				
19	2	Handtag till 1550	1553				
20	1	Handtagsbrygga komplett	13-1571-8				

Montering

- Gåbord ADAM bred med gasfjäder 25kg levereras ihopmonterad.
- Handtagen, nr 19, är av transportskäl vända upp och ned. Vänd ett handtag i taget. Detta görs genom att demontera låsspak, nr 22, vänd på handtaget och montera tillbaka låsspaken med bricka.

Användning

VAR UPPMÄRKSAM PÅ KLÄMRISK
GÅBORDET FÅR INTE ANVÄNDAS TILL NÅGOT ANNAT ÄN DET ÄR AVSETT FÖR

- Max brukarvikt 150kg
- Bekväm höjd justeras in med hjälp av gashandtag, nr 20. För att bibehålla en hög säkerhet bör låsspakarna, nr 12, vara åtdragna vid användning.
- Bekväm bredd mellan dynorna justeras med korsvreden, nr 7.
- Bekväm placering av handtagen justeras med hjälp av låsspakarna, nr 22.

KONTROLLERA ATT SAMTLIGA LÅSSPAKAR OCH VRED ÄR ORDENTLIGT ÅTDRAGNA! OBSERVERA ATT KROMBEN, NR 8, KAN SKADAS OM LÅSSPAK, NR 12, DRAS ÅT FÖR HÅRT.

Skötsel

- Gåbordet tvättas med vatten och vanligt rengöringsmedel utan lösningsmedel. Torka med torr eller något fuktig trasa.
- Kontrollera att hjulen är fria från smuts och damm.
- Vid byte av hjul använd locktite eller motsvarande för att låsa skruven.
- Krombenen, nr 8, kullänk, nr 26, samt manövreringsventil på gasfjäder, nr 23, bör med jämna mellanrum smörjas med vattenfast smörjfett.

Specifikation

Reglerbar höjd:	890-1 240mm	Innermått dynor:	340-490mm
Bredd:	820mm	Ytermått dynor:	640-780mm
Djup/längd:	730mm	Färg:	RAL 5014