

## Tillbehör



Hållare  
Korg

Art. nr. 300715730  
Art. nr. 300014110



Sidostöd kpl par Art. nr. 300015710



Droppställning Art. nr. 300015720

SMK AB

Öm Västra Backgården  
541 36 Skövde

Tfn: +46 500 - 49 50 60  
Fax: +46 500 - 41 14 37

Hemsida: [www.smkab.se](http://www.smkab.se)  
Epost: [post@smkab.se](mailto:post@smkab.se)


## Bruksanvisning

# Gåbord ADAM Bred gasfjäder 30kg



Art. nr. 300015301

 **SMK AB**

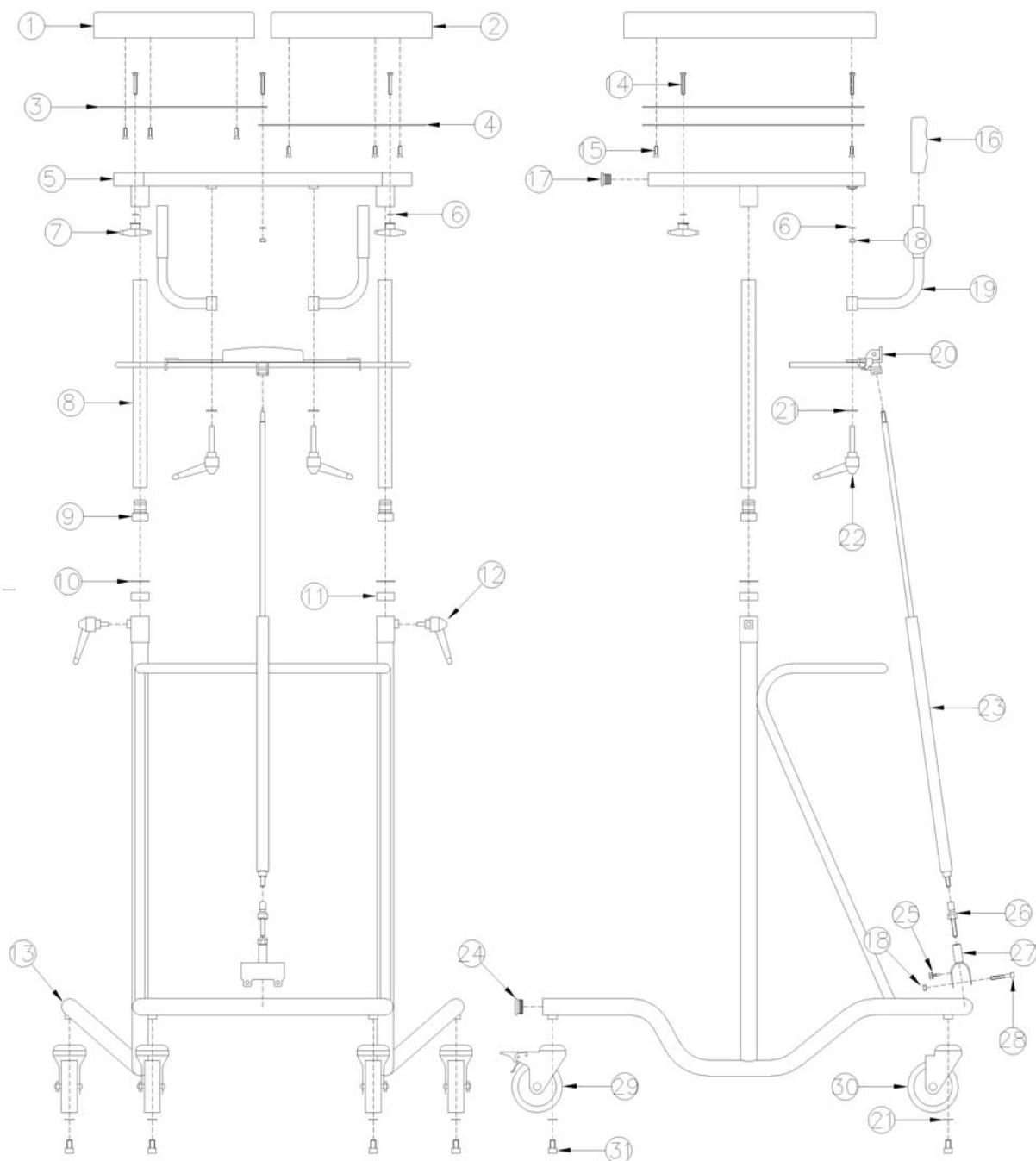

| Nr | Antal | Benämning                       | Art. nr    | Nr | Antal | Benämning                 | Art. nr     |
|----|-------|---------------------------------|------------|----|-------|---------------------------|-------------|
| 1  | 1     | Dyna höger                      | 1558-1     | 21 | 6     | Bricka, BRB 10,5x18x1,6   | 4331051     |
| 2  | 1     | Dyna vänster                    | 1558-2     | 22 | 2     | Låsspak WN511 83-M10x50   | 090222      |
| 3  | 1     | Underdel till dyna 1550 höger   | 1563-2     | 23 | 1     | Gasfjäder med ventil 300N | 905100-0    |
| 4  | 1     | Underdel till dyna 1550 vänster | 1563-1     | 24 | 2     | Plastfot 32mm svart       | GL32 SV     |
| 5  | 1     | Överdel till 1550               | 1552       | 25 | 1     | Skruv 4,3, x13 R6B B8x13  | R6B080131   |
| 6  | 3     | Bricka, BRB 6,4x12x1,5          | 1250641    | 26 | 1     | Fäste rak kullänk M8      | 900867      |
| 7  | 2     | Korsvred                        | 090227     | 27 | 1     | Undre gasdämparfäste 1550 | 13-94111801 |
| 8  | 2     | Kromben till 1550 Ø27x2         | 9338100451 | 28 | 2     | Skruv, M6x40 MC6S Insex   | 9128060401  |
| 9  | 2     | Kuts till gåbord                | 1560-N2    | 29 | 2     | 100x30C10 Länkhjul BR     | 14490       |
| 10 | 2     | Flänsring, SW stål 35 FZB       | SW0351     |    |       | alt. 125x30 Länkhjul BR   | 14500       |
| 11 | 2     | Nylonhylsa                      | 1590-N1    | 30 | 2     | 100x30C10 Länkhjul        | 14150       |
| 12 | 2     | Låsspak WN511 83-M10x20         | 090221     |    |       | alt. 125x30 Känkhjul      | 14160       |
| 13 | 1     | Underdel 1550 bred              | 1557-100   | 31 | 4     | Skruv, M10x16 MC6S Insex  | 9128100161  |
| 14 | 3     | Skruv, M6x40 MVBF Stål FZB      | 603060401  |    |       |                           |             |
| 15 | 6     | Skruv, M6x16 MFX                | 96506011   |    |       |                           |             |
| 16 | 2     | Handtag 22mm svart              | 33013219   |    |       |                           |             |
| 17 | 2     | Plastfot 50x25 svart            | VL50X25 SV |    |       |                           |             |
| 18 | 3     | M6 Låsmutter                    | 9850601    |    |       |                           |             |
| 19 | 2     | Handtag till 1550               | 1553       |    |       |                           |             |
| 20 | 1     | Handtagsbrygga komplett         | 13-1571-8  |    |       |                           |             |

## Montering

- Gåbord ADAM bred med gasfjäder 30kg levereras ihopmonterad.
- Handtagen, nr 19, är av transportskäl vända upp och ned. Vänd ett handtag i taget. Detta görs genom att demontera låsspak, nr 22, vänd på handtaget och montera tillbaka låsspaken med bricka.

## Användning

VAR UPPMÄRKSAM PÅ KLÄMRISK

GÅBORDET FÅR INTE ANVÄNDAS TILL NÅGOT ANNAT ÄN DET ÄR AVSETT FÖR

- Max brukarvikt 150kg
- Bekväm höjd justeras in med hjälp av gashandtag, nr 20. För att bibehålla en hög säkerhet bör låsspakarna, nr 12, vara åtdragna vid användning.
- Bekväm bredd mellan dynorna justeras med korsvreden, nr 7.
- Bekväm placering av handtagen justeras med hjälp av låsspakarna, nr 22.

KONTROLLERA ATT SAMTLIGA LÅSSPAKAR OCH VRED ÄR ORDENTLIGT ÅTDRAGNA! OBSERVERA ATT KROMBEN, NR 8, KAN SKADAS OM LÅSSPAK, NR 12, DRAS ÅT FÖR HÅRT.

## Skötsel

- Gåbordet tvättas med vatten och vanligt rengöringsmedel utan lösningsmedel. Torka med torr eller något fuktig trasa.
- Kontrollera att hjulen är fria från smuts och damm.
- Vid byte av hjul använd locktite eller motsvarande för att låsa skruven.
- Krombenen, nr 8, kullänk, nr 26, samt manövreringsventil på gasfjäder, nr 23, bör med jämna mellanrum smörjas med vattenfast smörjfett.

## Specifikation

|                 |             |                  |           |
|-----------------|-------------|------------------|-----------|
| Reglerbar höjd: | 890-1 240mm | Innermått dynor: | 340-490mm |
| Bredd:          | 820mm       | Ytermått dynor:  | 640-780mm |
| Djup/längd:     | 730mm       | Färg:            | RAL 5014  |