

## Tillbehör



Hållare  
Korg

Art. nr. 300715730  
Art. nr. 300014110



Sidostöd kpl par Art. nr. 300015710



Droppställning Art. nr. 300015720

SMK AB

Öm Västra Backgården  
541 36 Skövde

Tfn: +46 500 - 49 50 60

Fax: +46 500 - 41 14 37

Hemsida: [www.smkab.se](http://www.smkab.se)

Epost: [post@smkab.se](mailto:post@smkab.se)


## Bruksanvisning

# Gåbord ADAM BRED



Art. nr. 300015502

 **SMK AB**

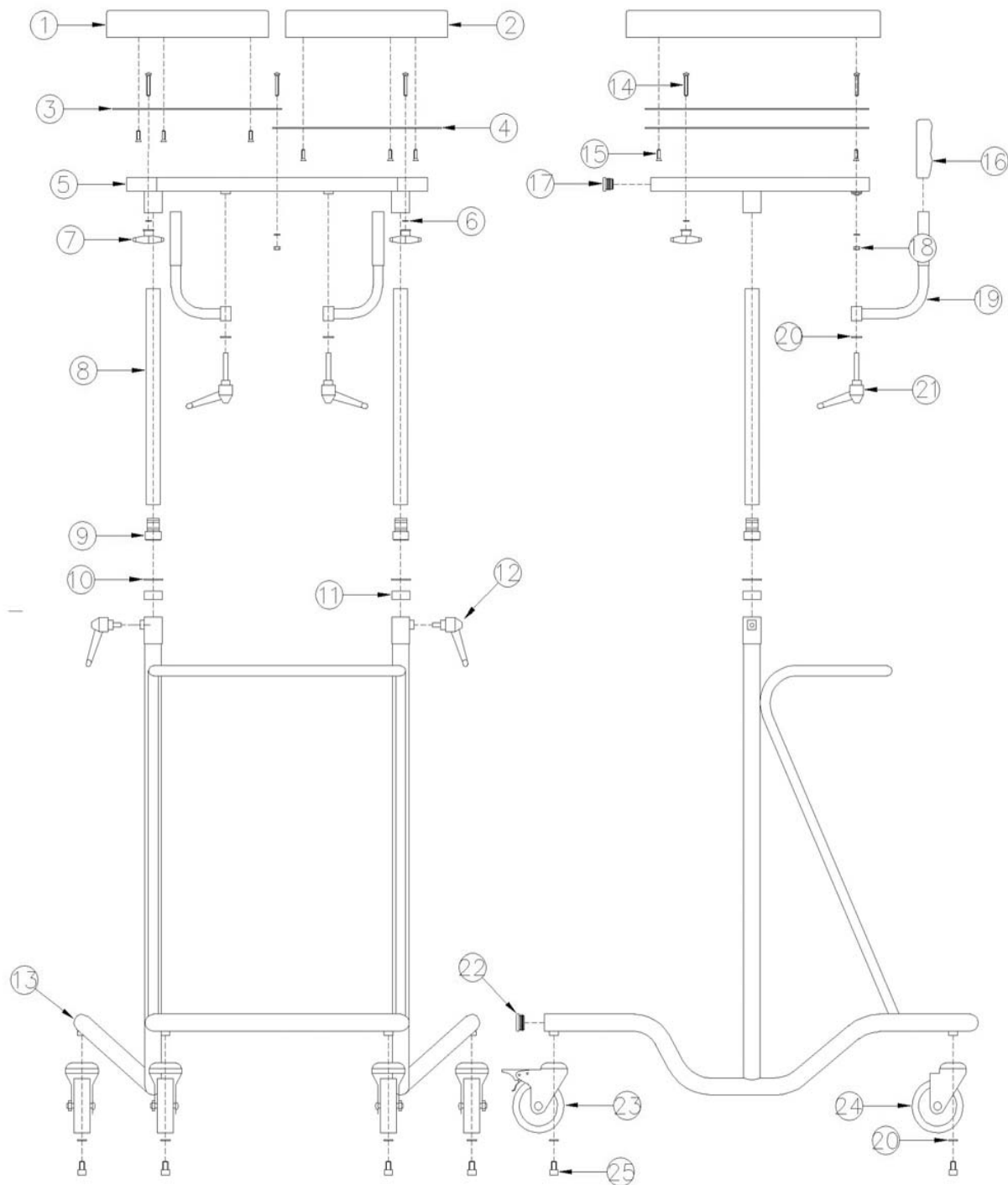

Nr	Antal	Benämning	Art. nr	Nr	Antal	Benämning	Art. nr
1	1	Dyna höger	1558-1	21	2	Låsspak WN511 83-M10x50	090222
2	1	Dyna vänster	1558-2	22	2	Plastfot 32mm svart	GL32 SV
3	1	Underdel till dyna 1550 höger	1563-2	23	2	100x30C10 Länkhjul BR	14490
4	1	Underdel till dyna 1550 vänster	1563-1			alt. 125x30 Länkhjul BR	14500
5	1	Överdel till 1550	1552	24	2	100x30C10 Länkhjul	14150
6	3	Bricka, BRB 6,4x12x1,5	1250641			alt. 125x30 Länkhjul	14160
7	2	Korsvred WN64 60-M6	090227	25	4	Skruv, M10x16 MC6S Insex	912810061
8	2	Kromben till 1550 Ø27x2	1555				
9	2	Kuts till gåbord	1560-N2				
10	2	Flänsring, SW stål 35 FZB	SW0351				
11	2	Nylonhylsa	1590-N1				
12	2	Låsspak WN511 83-M10x20	090221				
13	1	Underdel 1550 bred	1557-100				
14	3	Skruv, M6x40 MVBF	603060401				
15	6	Skruv, M6x16 MFX	965060161				
16	2	Handtag 22mm svart	33013219				
17	2	Plastfot 50x25 svart	VL50X25 SV				
18	1	M6 Låsmutter	9850601				
19	2	Handtag till 1550	1553				
20	6	Bricka, BRB 10,5x18x1,6	4331051				

## Montering

- Gåbord ADAM bred levereras ihopmonterad.
- Handtagen, nr 19, är av transportskäl vända upp och ned. Vänd ett handtag i taget. Detta görs genom att demontera låsspak, nr 21, vänd på handtaget och montera tillbaka låsspaken med bricka.

## Användning

VAR UPPMÄRKSAM PÅ KLÄMRISK. GÅBORDET FÅR INTE ANVÄNDAS TILL NÅGOT ANNAT ÄN DET ÄR AVSETT FÖR.

- Max brukarvikt 150kg
- Bekväm höjd justeras in med hjälp av låsspakarna.
- Höj aldrig bordet högre än vad MAX-markeringen på krombenen visar.
- Bekväm bredd mellan dynorna justeras med korsvreden, nr 7.
- Bekväm placering av handtagen justeras med hjälp av låsspakarna, nr 24.

KONTROLLERA ATT SAMTLIGA LÅSSPAKAR OCH VRED ÄR ORDENTLIGT ÅTDRAGNA! OBSERVERA ATT KROMBEN, NR 8, KAN SKADAS OM LÅSSPAK, NR 12, DRAS ÅT FÖR HÅRT.

## Skötsel

- Gåbordet tvättas med vatten och vanligt rengöringsmedel utan lösningsmedel. Torka med torr eller något fuktig trasa.
- Kontrollera att hjulen är fria från smuts och damm.
- Vid byte av hjul använd locktite eller motsvarande för att låsa skruven.
- Krombenen, nr 8, bör med jämna mellanrum smörjas med vattenfast smörjfett.

## Specifikation

Reglerbar höjd:	800-1 420mm	Innermått mellan dynor:	340-490mm
Bredd:	820mm	Ytermått dynor:	640-780mm
Djup/längd:	730mm	Färg:	RAL 5014